

cardiolife AED

Défibrillateur automatisé externe

AED-2152K



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**



Only 3 steps to save a **life***

Étape 1. Allumez l'AED

Lorsque vous allumez l'appareil, son couvercle s'ouvre automatiquement. Des consignes vocales simples vous guident tout au long de la procédure.

Étape 2. Fixez les électrodes

Les électrodes de l'AED sont pré-connectées et il est inutile de distinguer la droite de la gauche. Il suffit de retirer le film protecteur et de les presser sur le thorax du patient.

Étape 3. Appuyez sur le bouton « choc »**

Lorsque les électrodes sont appliquées sur le thorax du patient, l'analyse démarre automatiquement en mode instruction. Si l'AED indique qu'une défibrillation est nécessaire, il suffit d'appuyer sur le bouton « choc » clignotant. Tout le monde peut sauver une vie !

**En mode SME, l'opérateur doit décider si la synchronisation ECG doit être analysée en appuyant sur le bouton analyse.

Test automatique pour plus de fiabilité

L'AED possède une fonction de contrôle automatique effectuant des tests quotidiens et mensuels.



Test du système

Indique l'état de fonctionnement de l'appareil par des signaux vert et rouge.



Test de la batterie

Indique la durée de vie restante de la batterie et les points posant éventuellement problème.



Test des électrodes

Les connecteurs d'électrodes Nihon Kohden possèdent une technologie spéciale* qui contrôle et indique l'état des électrodes.
*brevet en attente




* 3 étapes pour sauver une vie




Défibrillateur automatisé externe
AED-2152K

Guide d'utilisation convivial affiché à l'écran

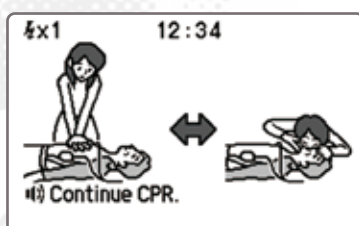

Instructions de RCP

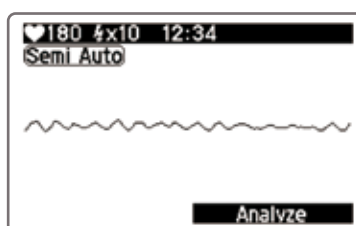

Analyse semi-automatique FV



L'AED-2152K peut être utilisé sur des enfants en changeant les électrodes et en sélectionnant le mode correspondant.

Enregistrez les données et visualisez les sur un PC

L'AED-2152K peut enregistrer 90 minutes de données ECG, y compris les annotations d'événement, que vous pouvez ensuite revoir sur un PC à des fins de diagnostic.



Interface Bluetooth


Les données de réanimation et les résultats des tests automatiques peuvent être transférés sur un PC grâce à une connexion Bluetooth sans fil.

Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.



Options

- Boîtier de l'AED (YZ-042H8)
- Kit de montage mural de l'AED (KG-202V)
- Batterie (SB-212VK/SB-214VK)
- Électrodes de défibrillation (P-530K)
- Mallette de transport (YC-210V)
- Visionneuse de rapport de l'AED (QP-210VK)

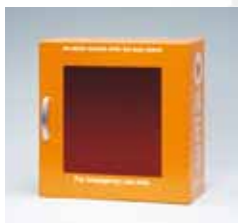

Save a life with cardiolife AED*

* Sauvez une vie avec l'AED Cardiolife

Nihon Kohden se réserve le droit de modifier ou de remplacer cette brochure à tout moment et sans préavis.

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Allemagne
Téléphone: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Fax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99
Internet: www.nihonkohden.net, E-Mail: info@nke.de

 **NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN FRANCE SARL
8, rue François Delage, 94230 Cachan, France
Téléphone: +33 (0) 1 49 08 05 50, Fax: +33 (0) 1 49 08 93 32
Internet: www.nihonkohden.fr, E-Mail: info@nkfrance.fr